

Variolink® Esthetic

Variolink Esthetic – это адгезивная фиксирующая система со стабильным цветом для постоянной фиксации керамических и композитных реставраций. Variolink Esthetic выпускается в двух вариантах: светового отверждения (Variolink Esthetic LC) и двойного отверждения (Variolink Esthetic DC).



Концепция материала базируется на эстетичных фиксирующих композитах Variolink II и Variolink Veneer, которые уже давно зарекомендовали себя в клинической практике.

Показания / противопоказания

Показания к применению Variolink Esthetic LC

- Постоянная фиксация реставраций из стеклокерамики, дисиликата лития и композита (inlay, onlay и виниры)
- Variolink Esthetic LC применяется только для реставраций с небольшой толщиной <2 мм и подходящей прозрачностью (например, IPS e.max® HT).

Показания к применению Variolink Esthetic DC

- Постоянная фиксация реставраций из стеклокерамики, дисиликата лития и композита (inlay, onlay, частичные коронки, коронки, мостовидные протезы)
- Постоянная фиксация реставраций из опаковой керамики, например оксидная керамика, только в сочетании отдельно отверждаемым светом адгезивом.

Противопоказания

Применение Variolink Esthetic противопоказано

- Если не может быть обеспечено сухое рабочее поле или установленный протокол работы не может быть применен
- Если у пациента есть аллергия к любому из компонентов Variolink Esthetic.

Цветовая концепция

Variolink Esthetic выпускается в следующих пяти цветах:



Чтобы точно согласовать цвет реставрации с цветом соседних зубов, Ivoclar Vivadent разработал сбалансированную цветовую концепцию. Цвет «нейтральный» обеспечивает благодаря своей прозрачности нейтральную в цветовом отношении фиксацию реставрации. Цвета «светлый» и «светлый +» позволяют осветлять реставрацию; цвета «теплый» и «теплый+» затемняют фиксирующуюся на них керамическую или композитную реставрацию.

Линия материала дополняется примерочными пастами VariolinkR Esthetic Try-In, это водорастворимые глицериновые пасты. С помощью примерочных паст Try-In имитируется цвет цельнокерамической реставрации (виниры, вкладки типа Inlay, Onlay, коронки и мостовидные протезы), которая должна быть зафиксирована на композит Variolink

Esthetic. По прозрачности и цвету пасты Try-In соответствуют **полимеризованному (!)** фиксирующему композиту Variolink Esthetic

Преимущества:

- Понятная цветовая система
- Цветовая стабильность материала, благодаря отсутствию в его составе аминов и запатентованному высокореактивному светоинициатору Ivocerin®
- Легкое удаление излишков
- Консистенция по ситуации, идеальное сочетание текучести и стабильности
- Надежный бондинг в сочетании с Tetric N-Bond Universal
- Специальный состав наполнителя обеспечивает очень высокую рентгеноконтрастность материала Variolink Esthetic
- Флюоресценция сравнимая с флюоресценцией натуральных зубов



Variolink Esthetic LC System Kit 681202AN
Tetric N-Bond Universal (Bottle)

Variolink Esthetic LC	1x 2g	Light
	1x 2g	Neutral
	1x 2g	Warm
Variolink Esthetic Try-In Paste	1x 1.7g	Light
	1x 1.7g	Neutral
	1x 1.7g	Warm
Tetric N-Bond Universal bottle	1x 6g	
Monobond N	1x 5g	
Liquid Strip	1x 2.5g	
N-Etch Syringe	1x 2g	
Vivadent Applicators	50	
Application Tips Variolink	20	
Brush Holder	1	
Brushes, soft	50	
Various accessories		



Variolink Esthetic DC System Kit 681854AN
Tetric N-Bond Universal (Bottle)

Variolink Esthetic DC	1x 5g	Light
	1x 5g	Neutral
	1x 5g	Warm
Variolink Esthetic Try-In Paste	1x 1.7g	Light
	1x 1.7g	Neutral
	1x 1.7g	Warm
Tetric N-Bond Universal bottle	1x 6g	
Monobond N	1x 5g	
Liquid Strip	1x 2.5g	
N-Etch Syringe	1x 2g	
Vivadent Applicators	50	
Application Tips Variolink	5	
Mixing Tips	30	
Brush Holder	1	
Brushes, soft	50	
Various accessories		